

# Cetilar<sup>®</sup> Tape

PHARMANUTRA


## Striscia adesiva anelastica

per articolazioni, muscoli, tendini, a base di esteri cetilici (CFA)

**INDICAZIONI:** Cetilar<sup>®</sup> Tape è una striscia adesiva anelastica che, grazie alla sua formulazione a base esteri cetilici (CFA) di origine vegetale, è indicata nel trattamento delle affezioni articolari su base osteoartritica, per migliorare la funzionalità articolare e la capacità di movimento, e per ridurre la sintomatologia dolorosa. Riduce il dolore articolare e muscolo-scheletrico rapidamente; è utile per il recupero della motilità nei periodi di riabilitazione conseguenti a fenomeni infiammatori o traumi articolari; può essere utile in caso di traumi sportivi alle articolazioni per recuperare il naturale movimento.

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:** La striscia adesiva anelastica Cetilar<sup>®</sup> Tape contiene una miscela brevettata di esteri cetilici (CFA) di origine vegetale che una volta applicata sulla zona dolente contribuisce al recupero della mobilità, migliorando la funzionalità e la capacità di movimento. La natura lipidica degli esteri cetilici, inoltre, svolge un'azione emolliente sull'area di applicazione, volta anche a prevenire fenomeni irritativi sulla cute. La presenza del mentolo conferisce al prodotto una fresca profumazione, rendendolo gradevole all'olfatto.

## MODALITÀ D'USO:

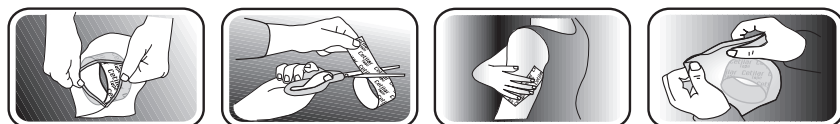

1. Aprire la confezione ed estrarre la striscia.
2. Tagliare la striscia su misura in base alla necessità.
3. Assicurarsi che la pelle sia pulita ed asciutta prima dell'applicazione. Applicare esercitando una lieve pressione per fare aderire bene i bordi alla pelle. Mantenere in situ per 8 ore.
4. Riporre il prodotto nella confezione.

# Cetilar<sup>®</sup> Tape



L'applicazione può essere ripetuta nella giornata lasciando areare per un breve periodo la superficie cutanea tra un'applicazione e l'altra per prevenire eventuali fenomeni di sensibilizzazione. Le strisce adesive sono monouso e non riutilizzabili.

**INGREDIENTI:** Acidi grassi cetilati di origine vegetale, copolimero acrilato, mentolo.

**AVVERTENZE:** Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Solo per uso esterno. Il prodotto va applicato solo su cute integra, pulita e asciutta. Evitare il contatto con mucose, occhi e bocca, nel caso lavare abbondantemente con acqua. Rimuovere la striscia adesiva durante il bagno/doccia. Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto. Non utilizzare in caso di accertata ipersensibilità verso i componenti. Non ingerire. Conservare in luogo fresco e asciutto, tra 5°C e 40°C. Non usare il prodotto se il confezionamento è danneggiato. Non utilizzare oltre la data di scadenza. Non impiegare Cetilar<sup>®</sup> Tape contemporaneamente ad altri trattamenti topici impiegati sulla zona da trattare, senza aver consultato il proprio medico. In caso di gravidanza e allattamento, consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Nei bambini di età inferiore ai 12 anni consultare il medico prima di utilizzare il prodotto.

**CONFEZIONE:** Una confezione di Cetilar<sup>®</sup> Tape deve contenere al suo interno una striscia anelastica.



Dispositivo Medico  
USO ESTERNO

Lotto e data di scadenza:  
vedi fondo della confezione



Pharmanutra S.p.A.  
Via delle Lenze, 216/b - 56122 Pisa  
info@pharmanutra.it - [www.pharmanutra.it](http://www.pharmanutra.it)

