

Cetilar[®] Patch

PHARMANUTRA

Cerotti per articolazioni, muscoli, tendini a base di esteri cetilici (CFA)

INDICAZIONI: Cetilar[®] Patch è un cerotto che, grazie alla sua formulazione a base di esteri cetilici (CFA) di origine vegetale, è indicato nel trattamento delle affezioni articolari su base osteoartrotica, per migliorare la funzionalità articolare e la capacità di movimento, e per ridurre la sintomatologia dolorosa. Riduce il dolore articolare e muscolo-scheletrico rapidamente; è utile per il recupero della motilità nei periodi di riabilitazione conseguenti a fenomeni infiammatori o traumi articolari; può essere utile in caso di traumi sportivi alle articolazioni per recuperare il naturale movimento.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Il cerotto Cetilar[®] Patch contiene una miscela brevettata di esteri cetilici (CFA) di origine vegetale che una volta applicata sulla zona dolente contribuisce al recupero della mobilità, migliorando la funzionalità e la capacità di movimento. La natura lipidica degli esteri cetilici, inoltre, svolge un'azione emolliente sull'area di applicazione, volta anche a prevenire fenomeni irritativi sulla cute. La presenza del mentolo conferisce al prodotto una fresca profumazione, rendendolo gradevole all'olfatto.


MODALITÀ D'USO:

ESTRAI




1. Aprire la busta ed estrarre il cerotto.

RIMUOVI

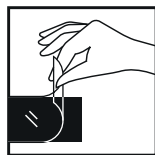


2. Rimuovere la carta di protezione utilizzando l'apertura facilitata al centro.

APPLICA

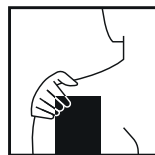

3. Assicurarsi che la pelle sia pulita ed asciutta prima dell'applicazione. Applicare esercitando una lieve pressione per fare aderire bene i bordi alla pelle. Mantenerlo in situ per 8 ore.

RIPONI

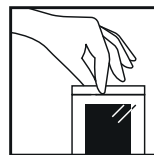

4. Richiudere la busta tramite il minigrip.

L'applicazione può essere ripetuta nella giornata lasciando areare per un breve periodo la superficie cutanea tra un'applicazione e l'altra per prevenire eventuali fenomeni di sensibilizzazione. I cerotti sono monouso e non riutilizzabili.

INGREDIENTI: Acidi grassi cetilati di origine vegetale, copolimero acrilato, mentolo.

AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Solo per uso esterno. Il prodotto va applicato solo su cute integra, pulita e asciutta. Evitare il contatto con mucose, occhi e bocca, nel caso lavare abbondantemente con acqua. Rimuovere il cerotto durante il bagno/doccia. Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto. Non utilizzare in caso di accertata ipersensibilità verso i componenti. Non ingerire. Conservare in luogo fresco e asciutto, tra 5°C e 40°C. Non usare il prodotto se il confezionamento è danneggiato. Non utilizzare oltre la data di scadenza. Non impiegare Cetilar[®] Patch contemporaneamente ad altri trattamenti topici impiegati sulla zona da trattare, senza aver consultato il proprio medico. In caso di gravidanza e allattamento, consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Nei bambini di età inferiore ai 12 anni consultare il medico prima di utilizzare il prodotto.

CONFEZIONE: Una confezione integra di Cetilar[®] Patch deve contenere una bustina richiudibile contenente, al suo interno, 5 cerotti monouso.




Dispositivo Medico
doping free
USO ESTERNO

PHARMANUTRA

Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavola, 1 - 56122 Pisa
info@pharmanutra.it - www.pharmanutra.it

Lotto e data di scadenza:
vedi fondo della confezione

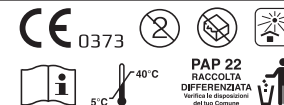

PAP 22
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Verifica le informazioni
del tuo Comune